

【検体送付方法】

①検体BOXセットの内容




下記の資材が入っております

- ・ 吸液シート入り緩衝袋
- ・ バイオパウチ
- ・ 検体BOX外箱
- ・ 送り状（冷凍使用）
- ・ 検査依頼書

②検体の梱包（バイオパウチ）

- 検体を入れたチューブを緩衝袋の吸水シートの間に入れてください

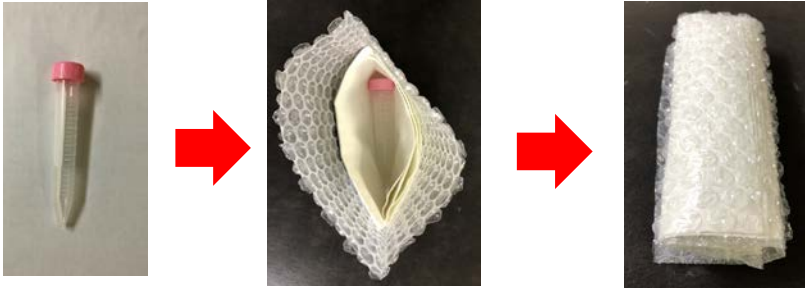

- 緩衝袋をバイオパウチに入れシール（点線部）を剥がして封入してください



- ✓ チューブは医療機関様で準備ください
- ✓ 検体は凍結したまま梱包ください
- ✓ チューブは複数入れても大丈夫です

→裏面につづく



③検体の梱包（検体BOX外箱）



外箱を組立て、
検査依頼書、バイオパウチ
を入れてください。

※保冷剤等は不要です。

荷姿（オモテ）



荷姿（ウラ）



検体BOXをガムテープ等で隙間なく梱包し、クール冷凍便指定の送り状を貼付してください。

※送料は施設様でご負担ください。

✓ 梱包後は冷蔵庫等で保管下さい。

梱包後2日以上保管する場合は冷凍庫で保管下さい。

【お問合せ先】

〒763-0042

香川県丸亀市港町307

株式会社伏見製薬所 衛生検査センター

TEL：0877-22-6276

