

2025年3月

新規受託開始のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より弊社製品には格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、下記検査項目につきまして、新たに受託を開始させて頂くこととなりましたのでご案内申し上げます。

先生方には何卒ご利用いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

■新規受託開始項目および実施日

【実施日】2025年4月1日（火）ご依頼分より開始

分類		検査項目	検体種類 検体量	保存 方法	検査方法	基準値	検査料
研究検査	自己抗体関連	シェーグレン症候群（SS）関連抗体検出セット 25抗原	血清 300 μ L	凍結	間接蛍光 抗体法	※	別途 見積

※抗原ごとにインデックス値（定量値）を報告致します。（－）（±）（＋）の判定値は抗原ごとに異なります。

以上

【本件に関してのお問合せ先】

株式会社伏見製薬所 衛生検査センター

TEL：0877-22-6276 E-mail：th@fushimi.co.jp

2025年4月受託開始

Sjögren's syndrome

シェーグレン症候群

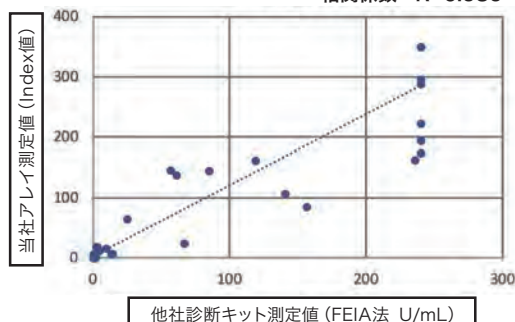
関連抗体検出セット

25種類の自己抗体を一度に検出可能

A-Cube®と同じアレイ技術を採用しております

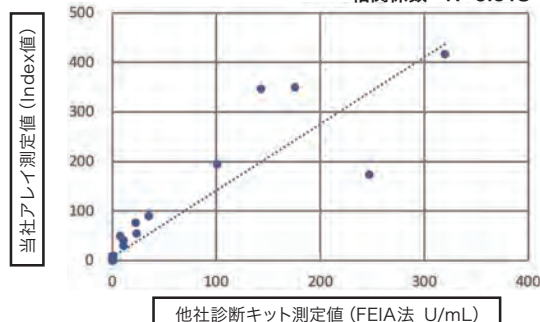
保険収載品比較

抗SS-A抗体

56検体
相関係数 R=0.939

*他社診断キットはRo52とRo60のミクスチャー抗原を使用しているため、アレイの測定値(Index値)は、Ro52とRo60の平均値をプロット

抗SS-B抗体

56検体
相関係数 R=0.918

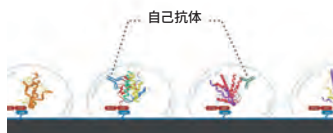
検査原理

1
STEP

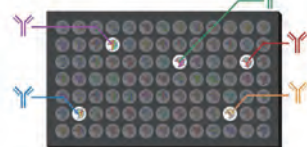
血清をアレイに反応させる

2
STEP

血清中の自己抗体がアレイ上の抗原タンパク質と結合する

3
STEP

自己抗体を検出する



本検査で検出可能な抗体(抗原)

検出抗体	抗原	保険診療でも検出可能
SS-A/Ro52	TRIM21(1-267) TRIM21(268-475_D355A)	▲
SS-A/Ro60	TROVE2	▲
SS-B	SSB	●
AMA-M2 (ミトコンドリアM2)	DLAT	▲
	DLST	▲
	DBT	▲
	PDHX	
CENP-A	CENPA	
CENP-B	CENPB	●
CENP-C	CENPC	
HP1α/CBX5	CBX5	
MIS12C	以下4抗原の複合体	
MIS12	MIS12	
DSN1	DSN1	
NSL1	NSL1	
PMF1	PMF1	
SSSCA1	SSSCA1	
KLHL7	KLHL7	
KLHL12	KLHL12	
IFI-16	IFI16	
TRIM38	TRIM38	
NA14	SSNA1	
GW182	TNRC6A	
Cal3(Calponin 3)	CNN3	

●: 保険診療でも個別に検出が可能

▲: 保険診療ではミクスチャーで検出が可能

本サービスは研究目的でのみ提供されるものです。診断目的には使用できません。

産総研技術移転ベンチャー

プロテオブリッジ株式会社



〒135-0064 東京都江東区青海2-4-7

国立研究開発法人 産業総合研究所 臨海センター別館5108号

TEL: 03-6457-1661 / E-mail: kensa@proteo-bridge.co.jp

■ 検査受託・問合せ先



株式会社伏見製薬所 衛生検査センター

〒763-0042 香川県丸亀市港町307

TEL: 0877-22-6276 / E-mail: th@fushimi.co.jp

結果報告書例

検査結果報告書

報告書ID



顧客ID 顧客名

受付日 ××年 ××月 ××日

氏名・識別ID AAAAA0001

検査ID ××××A××

性別 女性

年齢 ××歳

採取日 ××年 ××月 ××日

材料 血清

検査名 シェーグレン症候群関連抗体検出セット

抗体	抗原	結果(Index値)	判定
SS-A/Ro52	TRIM21(1-267)*	157.2	+
	TRIM21(268-475_D355A)	8.5	±
SS-A/Ro60	TROVE2	63.2	+
SS-B	SSB	47.7	+
AMA-M2 (ミトコンドリアM2)	DLAT	0.0	-
	DLST*	0.2	-
	DBT*	0.0	-
	PDHX	3.5	-
CENP-A	CENPA	0.4	-
CENP-B	CENPB	0.4	-
CENP-C	CENPC	0.5	-
HP1α/CBX5	CBX5	0.4	-
MIS12C	以下4抗原の複合体*	0.0	-
MIS12	MIS12*	0.0	-
DSN1	DSN1*	0.0	-
NSL1	NSL1*	0.5	-
PMF1	PMF1*	1.3	-
SSSCA1	SSSCA1	1.7	-
KLHL7	KLHL7*	0.2	-
KLHL12	KLHL12*	0.0	-
IFI-16	IFI16	43.5	+
TRIM38	TRIM38*	0.0	-
NA14	SSNA1	0.0	-
GW182	TNRC6A	0.0	-
Cal3(Calponin 3)	CNN3	0.0	-

判定基準 (単位_Index値)

(-):7.0未満

(±):7.0以上~10.0以下

(+):10.0を超える

*判定基準 (単位_Index値)

(-):10.0未満

(±):10.0以上~13.0以下

(+):13.0を超える

結果に関する問い合わせ先

プロテオブリッジ(株)

A-Cube検査事業部

e-mail: kensa@proteo-bridge.co.jp

Tel. 03-6457-1661

月~金_10:00~12:00, 13:00-17:00

土日, 祝祭日, 年末年始を除く

報告日 ××年 ××月 ××日

検査結果報告書作成者 ●●